



Biosynex Strep A


Kort bruksanvisning

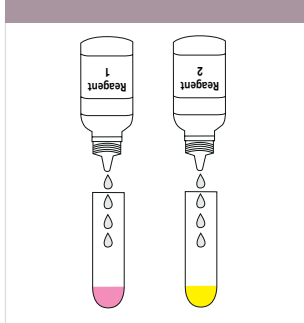


1 Tillsätt 4 droppar av reagens 1 (röd färg) i extraktionsröret. Tillsätt 4 droppar av reagens 2 i extraktionsröret. Blanda lösningen genom att försiktigt snurra röret. Lösningen får en gul färg.

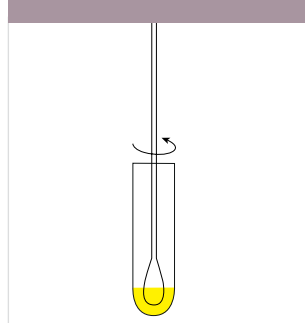

2 Ta halsprovet med den medföljande provpinnen och sätt provpinnen i extraktionsröret med den gula lösningen. Rör om kraftigt med provpinnen genom att rotera den 15 gånger.

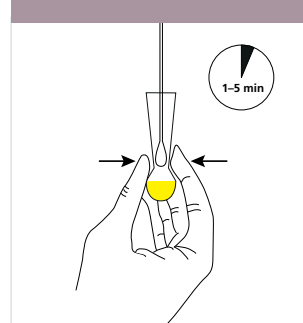


3 Pressa vätskan ur provpinnen genom att rotera och pressa den mot röret när du drar ut provpinnen. Kassera pinnen. Inkubera lösningen i minst 1 minut men helst i 5 minuter.

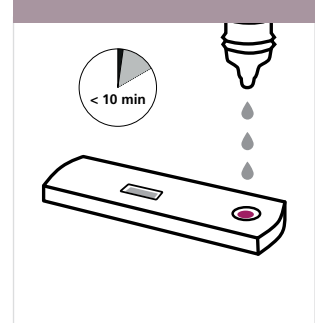


4 Sätt på dropphatten på extraktionsröret. Ta fram testkassetten och placera den på ett plant underlag. Tillsätt 3 droppar av lösningen från extraktionsröret i provbrunnen. Läs av resultatet efter 5 minuter men inte senare än 10 minuter.

Tolkning av resultat

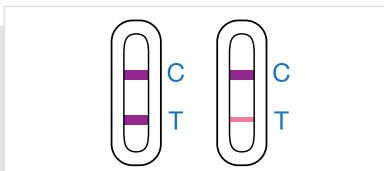


Positivt resultat

Två röda streck framträder. Ett streck framträder i testområdet (T) och det andra i kontrollområdet (C).

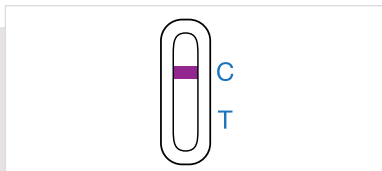

Negativt resultat

Ett rött streck syns i kontrollområdet (C). Inget streck syns i testområdet (T).

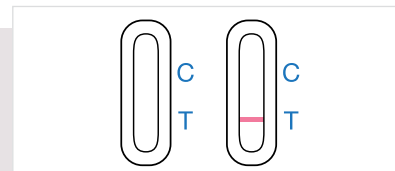

Ogiltigt resultat

Kontrollstrecket framträder inte. Gå igenom testproceduren och upprepa testet. Sluta använda testkitet om problemet kvarstår.

Försiktighetsåtgärder, provtagning och provhantering

- » Testkassetten ska förvaras i den förslutna folieförpackningen tills den ska användas.
- » Enbart för professionellt användande.
- » Låt alla reagens nå rumstemperatur (15–30°C) innan analys utförs.
- » Förvara och transportera alltid allt innehåll i testkitet vid 2–30°C.
- » Ta halsprovet med den sterila pinnen som medföljer kitet.
- » Analys ska utföras omedelbart efter provtagning. Om analys ej kan utföras omedelbart kan provet förvaras i ett rent och torrt plaströr upp till 8 timmar i rumstemperatur (15–30°C) eller i 72 timmar vid 2–8°C.



Orion Diagnostica Oy / Sverige
Box 520, 192 05 Sollentuna
Tel. 08-623 64 40, Fax 08-623 64 80
www.oriondiagnostica.se

8062-01SE, 04/2016

Produkt	Art.nr
Biosynex Strep A, 20 tester	1030005

För utförlig metodbeskrivning, se inlagan i förpackningen.